

Hortons demand startpaket. Kortbruksanvisning.

Denna kortbruksanvisning ska ses som ett komplement till bruksanvisningen. Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du påbörjar behandling med Hortons demand.

Komplett startpaket

Hortons demand startpaket innehåller de tillbehör du behöver för att ta din syrgasbehandling vid Hortons huvudvärk från en syrgasflaska med så kallad snabbkoppling. Hortons demand levereras i en väska med Hortons demand gassparare, 2 st ansiktsmasker, 2 st munstycken, 4 st utandningsventiler, bruksanvisning och varningstriangel.




Hortons demand startpaket.

Sparar gas och ökar säkerheten

Hortons demand ger endast syrgas när du andas in från masken eller munstycket. Därför sparar den syrgas jämfört med utrustning som ger motsvarande kontinuerligt flöde. Om du lägger ifrån dig Hortons demand avbryts tillförseln av syrgasen. När du börjar andas i masken eller munstycket tillförs syrgas igen. Därmed är Hortons demand ett säkert system och du riskerar inte att syrgas läcker ut när du inte tar din behandling.

Andningsteknik och "Press to test"

Vi rekommenderar att du sitter svagt framåtlutad och andas så normalt som möjligt med Hortons demand vid behandling av akut Hortons attack. "Press to test" funktionen används för att testa att utrustningen fungerar samt för att tömma ut resterande syrgas efter avslutad behandling.

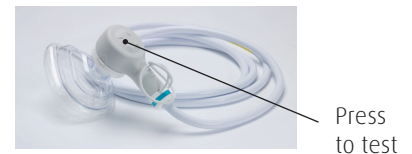


Mask, munstycke och utandningsventil

Både mask och munstycke finns att använda och din preferens bestämmer vad som används såvida inte din läkare ordinerat särskilt alternativ. Tillsammans med mask eller munstycke används alltid en utandningsventil som innehåller ett hygienfilter. Utandningsventilen rekommenderar vi att du byter ut efter 30 dagars användning. Behöver du ny mask, munstycke eller utandningsventil kontaktar du Linde Healthcares kundcenter på telefon 08-731 18 01 för att kostnadsfritt beställa nya som skickas hem till dig. Ange artikelnummer för det som du vill beställa:

- Ansiktsmask för vuxen, artikelnummer 329 399
- Munstycke, artikelnummer 329 149
- Utandningsventil, artikelnummer 321 588

Anslutning till snabbkoppling

Hortons demand ansluts enkelt till snabbkopplingen i syrgasflaskan. Tryck in kopplingen, kontrollera att den sitter fast genom att dra lätt i slangen, vrid därefter på gasen på flaskan. Du är nu klar för att börja din behandling.

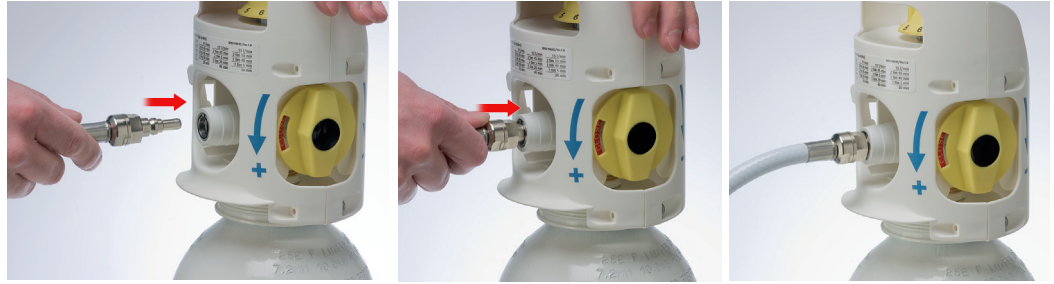

Exempel på hur Hortons Demand ansluts till syrgasflaskan Liv® Midi 10 L.

Efter avslutad behandling

Stäng av gastillförseln från syrgasflaskan. Tryck därefter på "Press to test" och släpp ut kvarvarande syrgas som finns i slangen. För därefter tillbaka den vita frigörningshylsan på snabbkopplingen och dra ut slangen.



Säkerhet oxygen

Hortons demand är avsedd att användas med MEDICINSK OXYGEN AGA i hemmet. Det är inte farligt att vistas i närheten av oxygen eller att använda oxygen. Beakta dock följande:

- ✓ MEDICINSK OXYGEN AGA är endast avsett för medicinskt bruk. Koppla endast flaskan till anslutning avsedd för medicinsk oxygen
- ✓ Rökning och öppen eld är förbjudet i det rum där oxygenbehandling pågår eftersom det ökar risken för brand
- ✓ Varningsskylt ska alltid sitta ca 50 cm från nederkant på insidan av ytterdörren för att informera brandman om brand skulle uppstå
- ✓ Lägg aldrig en oxygenmask eller näsgrimpa direkt på textilier när behandling pågår. Textilier som blivit syrgasmättade kan bli mycket lättantändliga/ brandfarliga. Om detta ändå skulle inträffa, skaka och vädra ur sådana textilier ordentligt
- ✓ Oxygen kan ansamlas i kläder och hår. Därför bör man vädra och skaka ur kläderna, borsta igenom hår/skäggväxt samt vänta 15 minuter innan man använder hårfön, gasspis, grillar, tändar ljus eller på annat sätt använder eld
- ✓ Brödrost, hårfön eller liknande utrustning med glödtråd ska inte användas under pågående oxygenbehandling
- ✓ Låt aldrig olja eller fett komma i kontakt med utrustningen
- ✓ Oxygenflaskor ska förvaras i lättillgängligt och i väl ventilerat rum
- ✓ Oxygenflaskor får inte utsättas för hög värme
- ✓ Utrustning som inte används ska vara avstängd
- ✓ Vid brand – stäng av utrustningen
- ✓ Håll alltid flaskan ren och torr

Frågor/reklamationer

Har du frågor om Hortons demand eller din behandling ska du alltid vända dig till din läkare. Vid eventuell reklamation ska du vända dig till ditt apotek och även beskriva problemet på bifogad reklamationsblankett.